


【形状・構造及び原理】

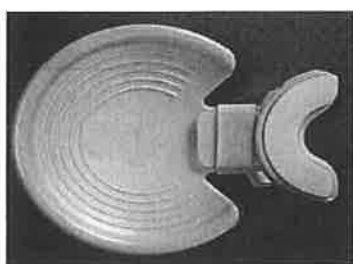

「原材料」：樹脂・ポリエチレン(PE)・天然ゴム

【使用目的又は効果】

本品は、患者の開口状態保持又は開口訓練に用いる器具。

【使用方法等】

作業部とハンドル部の間にゴムをかけ、ハンドル部に圧することで作業部が開き、開口状態を保持すること等が出来る。又、開口訓練としても使用できる。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 患者ごとに【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件で使用すること。
- 2) 本製品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- 3) 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
 - ① 本製品に対する曲げ・切削・加圧等
 - ② 粗雑な扱い(キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等)
 - ③ パーナ等による加熱
- 4) 薬液等が付着した場合は速やかに清拭すること

【保管の条件】

- ① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- ② 適切な保管・管理をすること。
(本品を保管する場所は、高温、多湿を避け、塵やほこりのない場所に保管すること、紫外線保管庫での保管は行わないこと。トーカーバンド(ゴム)は劣化しますので、保管は22度以下で空気の触れないところに保管してください)。

「使用期限等」

本品は、使用期限等を特別定めていない為長時間の使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事が有るため安全管理上新しい物と適時交換すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項(日常点検)〉

使用前・使用後の点検：使用前・使用後にハンドル部、テーパー部、切開部に破損、ヒビ、キズ及び腐食等がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

使用素材、形状及び構造の点から消毒を行うことは出来ない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社イシズカ

電話番号：048-981-2850

〔製造業者〕

株式会社イシズカ

国名：日本

〔販売業者(販売店)〕

株式会社東京歯材社

電話番号：03-3823-7501