

類別：機械器具(器 68)印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー
JMDN コード：16350000
販売名：ハイフレックス AC

※【形状、構造及び原理等】

1) 形状、構造



有歯顎(上顎) (下顎) 無歯顎(上顎) (下顎)



前歯(上顎) (下顎) 片顎(右下) (左下)

2) 材料

- ・本体 鉄(ニッケルメッキ)
- ・取手 ステンレス鋼
- ・コーティング樹脂 ダイアミド樹脂

3) 原理

- ・手動式

※【使用目的又は効果】

・使用目的

各種の印象材を盛って入歯等の印象を採取する器具として使用する。

・効果

本品の表面には、ダイアミド樹脂によるコーティングが施してある為患者が型取り時の噛み合わせの際金属による冷たさや違和感がなくソフトな感触が得られる。又型取りにより固化した印象材を本品から剥離する場合にコーティング材の弾力性により、容易に剥離することができる。従って清浄作業においても、本品から容易に印象材を除去することができる。

※【使用方法等】

- ・サイズ 有歯顎 上顎 LL・L・M・S・SS
下顎 LL・L・M・S・SS
無歯顎 上顎 L・M・S・SS
下顎 L・M・S・SS
片顎 右上左下用
左上右下用
前歯 上顎
下顎

・使用方法

- 1) 歯型採得時の各種印象材を乗せるトレーとして使用する。
- 2) 印象目的あるいは大きさにより、上記サイズから選択して使用する
- 3) 本品の本体の顎部を手で徐々に折り曲げるなどして、患者の有歯顎のサイズに合致するように本品を成形する。
- 4) 本品のアミの外側まで印象材が回り込むよう印象材を盛る。
- 5) 患者の有歯顎の全顎又は一部歯の型取りを行う。
- 6) 型取りにより固定した印象材をトレー本体から剥離する。
- 7) 使用後は本品のメッシュ部分に付着している印象材を除去し、本品を清浄しておく。

※【使用上の注意】

- 1) 器具の正しい使用のため、添付文章の注意、指示事項に従う事。
- 2) 本品は使用前にオートクレーブ殺菌、又は薬液殺菌を行ってから使用する事。
- 3) 本品の表面に鋭利な刃物等で傷をつけたりすることなく、丁寧に取り扱う事。表面に亀裂が生じると樹脂が剥離することがあります。
- 4) 本品の樹脂は火気に弱いので十分に注意する事。
- 5) 型取り時に患者の顎部に合致させるため本品を成形するときには、無理な力を加えたり、急激に折り曲げたりすることなく、手又は無傷性の器具を用いて本品の成形方向に順応して注意深く折り曲げる事。
- 6) 金属たわし、クレンザー等は器具の表面が損傷する為汚物除去及び清浄時に使用しない事。
- 7) 使用後は付着している血液、体液、薬品等直ちに清浄液等に浸す事。

※【保管方法及び有効期間等】

- 1) 錆びる恐れがある為水分が付着したまま保管しない事。(湿度の高い場所に長時間放置すると錆が発生し治療時に汚染を引き起こす恐れがある為湿度が低く清潔な場所に保管する事。)
- 2) 滅菌済の物を保管するにあたっては再汚染を防ぐ為清潔な場所に保管する事。

※【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前、使用後に破損・ヒビ・キズ・変色・腐敗等異常がないか確認する事。
- 2) 樹脂の劣化、傷、バリ等がないか確認し、口腔内を傷つける可能性のある物は新しい物と交換する事。
- 3) 本品の消毒は、薬液消毒あるいはオートクレーブ殺菌で行う事。
- 4) 消毒用薬液、清浄液の浸せき時間、温度等の使用法は各メーカーの指示に従い正しく使用し、長時間放置しない事。
- 5) オートクレーブ殺菌は、乾燥モードでは使用しない事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- ・製造販売業者：片瀬工業株式会社
製造業者：片瀬工業株式会社
住所：埼玉県所沢市山口257-5
電話番号：04-2922-7577
FAX番号：04-2924-0126
- ・販売業者：株式会社東京歯材社
住所：東京都台東区谷中2-5-20
電話番号：03-3823-7501
FAX番号：03-3823-7516