

類別： 機械器具 24 歯科診療室用機器  
 一般医療機器 歯接触分析装置(JMDN コード 70700000)

## 「T-スキャンⅢ」の付属品 (T-スキャンセンサシート)


再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

(1) 外観

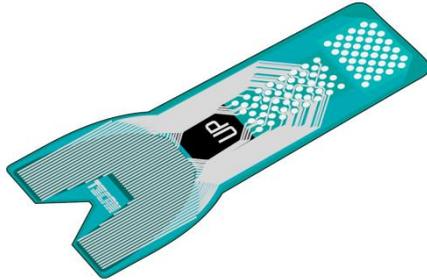

(2) 寸法

サイズS:幅 66.5mm×長さ 147mm×厚さ 0.1mm

サイズL:幅 73.7mm×長さ 153mm×厚さ 0.1mm

(3) 材質

ポリエステルフィルム(ポリエチレンテレフタレート)

(4) 動作原理

センサシートは厚さ約 0.1mm のフィルム状シートで、加わる力の大きさに応じて電気抵抗値が変化する特殊インクで薄膜が形成されています。薄膜の上下には一定間隔で格子状に電極が配列されており、これらの交点が個別の力検出点となっています。

### 【使用目的又は効果】

歯接触分析装置 T-スキャンⅢにおいて、圧力を検出するセンサシートとしてT-スキャンⅢ本体に接続して使用する。

### 【使用方法等】


ご使用にあたっては歯接触分析装置 T-スキャンⅢ本体の取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。

<使用前準備>


未滅菌品の為、初回使用する際は【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い、洗浄及び滅菌を行う。

<接続方法>

- 1) センサコネクタのアタッチレバーを引き上げてセンサシートの「UP」と記載されている面を上にして挿入する。

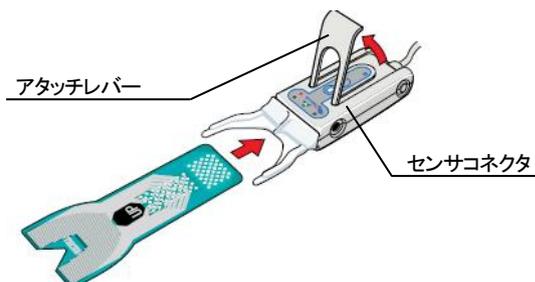

- 2) アタッチレバーを元の状態に戻す。

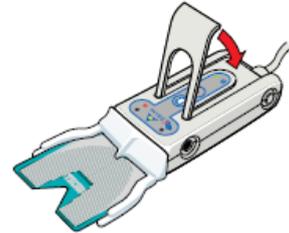

### 【保守・点検に係る事項】

(1) 洗浄、消毒、滅菌方法

オートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌）や消毒液に浸しての消毒は出来ません。70%イソプロピルアルコール溶液などの消毒液を含ませた脱脂綿等で拭き取って消毒してください。

(2) 使用者による保守点検事項

使用前に必ず下記を確認すること。(毎回)

- ・センサシートに破れや破損が無いこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者

名称：ニッタ株式会社

連絡先：03-6744-2720

取扱説明書を必ずご参照下さい