

歯科材料 06 歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 JMDNコード：70883000

## 販売名： バイトタブ

### \*【形状、構造及び原理等】

〈外観図〉

図-1



〈基本構成、仕様等〉

- ①本品は歯科咬合採得用材料である。
- ②本品は粒状を呈したコンパウンドであり、1粒ずつブリスターパックされ、シート状を呈している。
- ③1シートは36粒で、5シートが一単位で包装される。
- ④本品の形状、構造は、図-1のとおり。

### \*【使用目的又は効果】

- ①本品は、歯科用咬合器・顔弓を取り扱う際に一緒に使用する。
- ②本品は、クラウン、ブリッジ、義歯等を作製する為に、上下歯列の咬み合わせや上下顎の位置関係を記録する材料として使用する。

### \*【使用方法等】

- ①本品はバイトフォーク等の保持物に装着し、使用する(以下画像参照)。



- ②本品は、加熱溶解して使用する。  
(約40度の温水にて軟化させる事が好ましい)

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- ①本品の特性上、加熱溶解は患者の口腔内への装着に適した温度で行い、熱湯等の高温での実施は避けること。
- ②使用中に本品が保持物から脱落しないよう、装着状況には注意すること。
- ③患者の口腔内で脱落した場合、そのまま飲み込まないように注意すること。

### \*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①本品は、歯科医療有資格者以外は使用しない事。
- ②本品を使用するにあたっては、本品が患者の症例に適合するかどうかを歯科医師が判断すること。
- ③開封・溶解後は、できるだけすみやかに使用すること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

直射日光、高温多湿を避けて保管する。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ①製造販売業者 株式会社東京歯材社
- ②電 話 03-3823-7501
- ③製造業者 Panadent Corporation  
パナデント  
(国名：アメリカ合衆国)

(取扱説明書を必ずご確認ください)