


類別： 機械器具 24 歯科診療室用機器  
 一般医療機器 歯接触分析装置(JMDNコード 70700000)

## 「T-スキャンⅢ」の付属品 (センササポート)

### 【形状・構造及び原理等】

#### (1) 外観

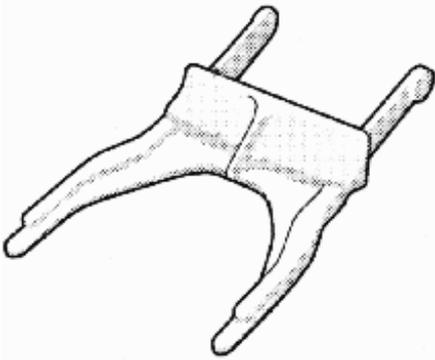

#### (2) 寸法

サイズS: 幅 92mm × 長さ 70mm × 高さ 14mm  
 サイズL: 幅 98mm × 長さ 77mm × 高さ 14mm

#### (3) 材質

ポリスルホン樹脂

#### (2) 使用者による保守点検事項

使用前に必ず下記を確認すること。(毎回)

- ・センササポートに損傷やがたつきが無いこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者  
 名称：ニッタ株式会社  
 連絡先：03-6744-2720

### 【使用目的又は効果】

歯接触分析装置 T-スキャンⅢにおいて、センサシートを保持するために T-スキャンⅢ本体に接続して使用する。

### 【使用方法等】


ご使用にあたっては歯接触分析装置 T-スキャンⅢの取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。

#### <使用前準備>

未滅菌品の為、初回使用する際は【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い、洗浄及び滅菌を行う。

#### <使用方法>

センサコネクタの挿入部にセンササポートの図の矢印部が上を向いた状態で挿入する。

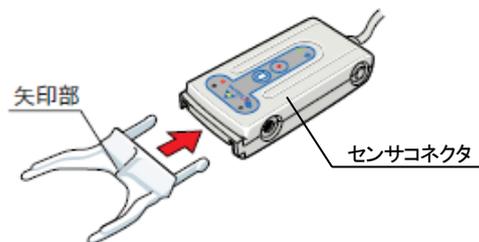

### 【保守・点検に係る事項】

#### (1) 洗浄、消毒、滅菌方法

オートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌）や消毒液に浸しての消毒が可能です。オートクレーブ滅菌をするときは、滅菌バックに入れ、熱源や缶体に密着しないようにしてください。重力置換式オートクレーブにより 132℃で 15 分間の滅菌を行ってください。滅菌の乾燥工程で 135℃を超えてしまう場合は、乾燥工程は行わないでください。

取扱説明書を必ずご参照下さい