

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー（16350000）


CTトレー

【禁忌・禁止】

感作・アレルギー反応を起こす可能性があるため、
本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴
がある患者に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状
本品の形状は、下図（写真）のとおり。
2. 原理
本品は、馬蹄形（または長方形）を呈した印象材の「保持部」と患者の口腔内に本品を挿入する際に持つ「柄部」から構成される。
3. 種類
①本品は用途に応じ「全顎用」と「局部顎用」の2種類がある。
②全顎用は3種類の大きさがあり、大きさにより「Sサイズ」「Mサイズ」「Lサイズ」と称する。
③局部顎用は1種類で「Pタイプ」と称する。
4. 原材料
本品の原材料（材質）はステンレス鋼である。

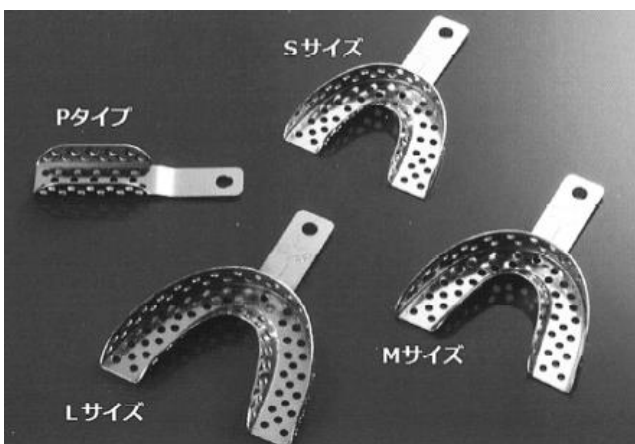

【使用目的又は効果】

本品は、印象採得時に、印象材を盛り、保持し、
圧接するために用いる器具である

【使用方法等】

- ①患者の口腔の大きさに合ったサイズを選択する
- ②印象材を本品に盛り、口腔内に装着し圧接する。
- ③印象材が硬化した後、口腔より取り出す。
- ④使用後は必ず洗浄を行う。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
- ②トレークリーナー、洗浄液、消毒液を使用する際は、それらの取扱い説明書に従うこと。
- ③使用前にバリや裂け、損傷や摩耗、変形、機能していない部位がないか点検すること。
- ④使用中、本品にねじりや圧をかける際は本品に破損や亀裂が生じないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ①高温・多湿・直射日光及び水濡れを避け、清潔な場所で保管すること。
- ②移動保管の際は本体に衝撃がかからないよう取扱いに注意すること。
- ③歯科の従事者以外が触れないよう、適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①洗浄時に金属束子や研磨材を用いないこと。本品の表面に傷をつける恐れがある。
- ②強酸性・強アルカリ性の洗浄剤や消毒液の使用は避けること。本品を腐食させる恐れがある。
- ③洗浄後は流水で十分にすすぎを行い、洗浄剤消毒液が残らないようにする。
- ④本品を保管する際は、十分に乾燥させること

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ①製造販売業者 株式会社東京歯材社
- ②電 話 03-3823-7501
- ③製造業者 有限会社小山田製作所