

器68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN10201000

スウィングマスター アーティキュレーター HM

【形状・構造及び原理等】



Type I



* Type I 改



* Type II

材質:アルミニウム、ステンレス鋼、真鍮、ABS樹脂

【使用目的又は効果】

蝶番付きの歯科用器具をいい、予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を本品に取り付ける。下顎運動の一部又は全部をシミュレートするように設計されている。

【使用方法等】

1. 使用方法

手指で固定し操作する。

- 1) セントリックをロックする際はセントリックパイプを上方に止まるまでしっかり上げてクランプC、セントリックスクリューをしっかりと止める。
- 2) クランプR クランプLは蝶番回転のロックに使用し、軽く締める事により横スライドのロックになる。
- 3) 模型をマウントする際には、必ずセントリックをロック状態にしてインサイザルボール上面と上顎フレームを同じ高さにして止めネジを締める。(上顎フレームと下顎フレームが平行になる。)
- 4) 蝶番回転運動ではクランプR クランプLのみ軽く緩める。

■ 詳細は取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

- ① 上記に定めた使用目的以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので必要以上の応力を加えないこと。
- ② 上記に定めた操作方法、使用方法を守り、それ以外には使用しないこと。

③ 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の2次加工(改造)は絶対に行わないこと。

④ 本品は、使用前に汚れ、傷、曲がり、破損等、性能、使用目的上支障がないことを確認すること。

1)重要な基本的注意

本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、速やかに使用を中止し医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

① 本品は、湿度が高くならない場所にて保管・管理する。

[錆を防ぐため]

[使用期間]

① 本品を使用中に破損又は汚染したおそれのある場合には、直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品といっしょに収納・保管しないこと。
- ② 水分等付着した場合は、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず乾燥すること。
- ③ 使用前に、汚れ、傷、曲がり、破損等に異常がないか点検をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元・製造元 株式会社 シオダ

電話番号 0287-88-2288