

歯科材料 06 歯科用印象材料
 一般医療機器 歯科咬合採得用材料 JMDNコード：70883000

「HAゴシックアーチ・トレーサー」の付属品

(HAゴシックアーチ・トレーサー/スパーサー)

【形状、構造及び原理等】

〈外観図〉図-1



〈基本構成、仕様等〉

本品の形状、構造は、図-1（○内）のとおり。

【使用目的又は効果】

本品は、クラウン、ブリッジ、義歯等を作製する為に、上下歯列の咬み合わせや上下顎の位置関係を記録するHAゴシックアーチ・トレーサーの部品として使用する。

【使用方法等】

使用にあたっては、HAゴシックアーチ・トレーサーの添付文書、取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①本製品の使用によりアレルギー反応が現れた場合は、使用を中止すること。
- ②口腔内に装着する際は使用前患者ごとに洗浄・滅菌（【保守点検に係る事項】参照）を行うこと。
- ③使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・滅菌すること。
- ④口腔内非装着の場合についても口腔内に装着する他の構成部品との接触が想定される場合は洗浄・消毒する事が好ましい。

詳細はHAゴシックアーチ・トレーサーの添付文書を参照すること。

(取扱説明書を必ずご確認ください)

【保管方法及び有効期間等】

詳細はHAゴシックアーチ・トレーサーの添付文書を参照すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①洗浄・滅菌の際は以下の事項に留意すること。
 - ・洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守り、使用説明書に従って使用すること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。
 - ・洗浄、消毒、滅菌には精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で金属腐食を起こすことがある。
 - ・腐食（錆び）の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
 - ・洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ②本品を使用する前の点検と使用後の操作を徹底すること。
 - ・損傷、摩耗、腐食、汚れ、又は機能していない部位がないかを必ず点検すること。
 - 異常が見られた場合は、使用を中止する事。

詳細はHAゴシックアーチ・トレーサーの添付文書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ①製造販売業者 株式会社東京歯材社
- ②電 話 03-3823-7501
- ③製造業者 株式会社東京歯材社