

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 JMDNコード：70883000

「HAゴシックアーチ・トレーサー」の付属品

（HAゴシックアーチ・トレーサー／描記板）

【形状、構造及び原理等】

〈外観図〉図-1



〈基本構成、仕様等〉

本品の形状、構造は、図-1（○内）のとおり。

【使用目的又は効果】

本品は、クラウン、ブリッジ、義歯等を作製する為に、上下歯列の咬み合わせや上下顎の位置関係を記録するHAゴシックアーチ・トレーサーの部品として使用する。

【使用方法等】

使用にあたっては、HAゴシックアーチ・トレーサーのカタログ、添付文書、取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①原則として患者毎の使用とし、使用の都度交換する事が好ましい。
- ②使用前、患者ごとに洗浄・滅菌（【保守点検に係る事項】参照）を行うこと。
- ③使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・滅菌すること。

詳細はHAゴシックアーチ・トレーサーの添付文書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

詳細はHAゴシックアーチ・トレーサーの添付文書を参照すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①洗浄・滅菌の際は以下の事項に留意すること。
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守り、使用説明書に従って使用すること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。
 - ・滅菌器を使用する場合、エチレンオキシドガス滅菌器の使用が好ましい。加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）を使用する場合、乾燥温度に注意すること。特に描記板は高温での乾燥により変形、器質の変質または変色することがある。
- ②本品を使用する前の点検と使用後の操作を徹底すること。
 - ・損傷、摩耗、腐食、汚れ、又は機能していない部位がないかを必ず点検すること。異常が見られた場合は、使用を中止する事。

詳細はHAゴシックアーチ・トレーサーの添付文書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ①製造販売業者 株式会社東京歯材社
- ②電 話 03-3823-7501
- ③製造業者 株式会社東京歯材社

（取扱説明書を必ずご確認ください）