


類別：機械器具(器 70) 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具
JMDN コード：70754000
販売名：アーチリング

** [形状、構造及び原理等]

① 形状・構造

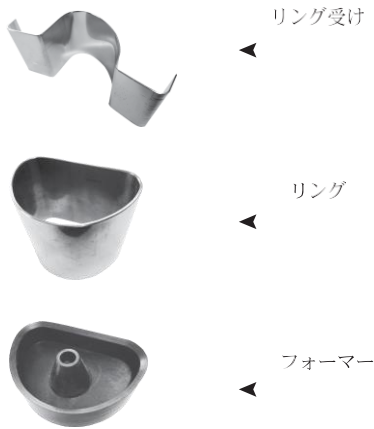

② 材 料

- ・リ ン グ： ステンレス鋼管 (JISG3141)
- ・リング受け： ステンレス鋼板 (JISG3141)
- ・フォーマー： 天然ゴム

③ 原 理

- ・ 埋没材を保持する容器

** [使用目的又は効果]

- ・ 使用目的


鑄造用補綴物を成形する型を保持するための容器として使用する。

- ・ 効果

歯列の配列角度に合わせ効率的なリングを選択でき埋没材の使用量を節約できる。

** [使用方法等]

- ・ サイズ

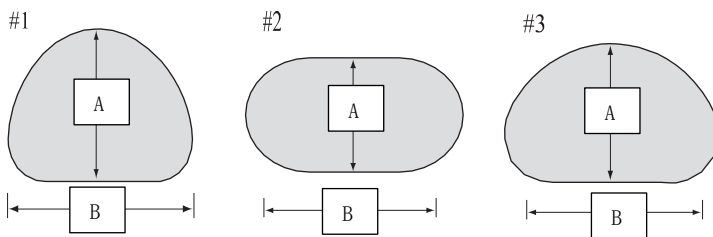

- 1M：47～48 (A) × 68～71 (B) × 54～56L (埋没材：約180g)
2M：38～40 (A) × 73～75 (B) × 54～56L (埋没材：約180g)
3M：42～43 (A) × 74～77 (B) × 54～56L (埋没材：約180g)
1L：47～48 (A) × 68～71 (B) × 64～66L (埋没材：約180g)
2L：38～40 (A) × 73～75 (B) × 64～66L (埋没材：約180g)
3L：42～43 (A) × 74～77 (B) × 64～66L (埋没材：約180g)

- ・ 使用方法

- 1) 遠心鑄造器を調節してルツボとリングのセンターを合わせて使用する。
- 2) 鑄造物の大きさ形状に合わせて上記サイズから選択して使用する。
- 3) ヨシダ社製、カー社製、細部論社製の遠心鑄造器は、使用できます。
- 4) 他メーカーの遠心鑄造器をお使いの場合は、鑄造機メーカーにご確認の上、ご使用ください。

** [使用上の注意]

- 1) 使用前、掃除してから使用すること。
- 2) 表面に鋭利な刃物などで傷をつけることなく、丁寧に扱うこと。
- 3) リング用リボン、埋没材の使用に関しては、各メーカーの指示に従って使用すること。

** [保管方法及び有効期間等]

直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する。但し、有効期間は定めない。

** [保守、点検に係る事項]

使用前、使用後に点検をし破損・ヒビ・キズ・変色・腐食がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止すること。また長期の使用により金属疲労や摩擦等の劣化が生じるので適宜交換すること。

[製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等]

- ・ 製造販売業者
製 造 元： 片瀬工業株式会社
住 所： 〒359-1145 埼玉県所沢市山口257-5
電話番号： 04-2922-7577
FAX番号： 04-2924-0126

- ・ 販売業者

- 販 売 元： 株式会社東京歯材社
住 所： 〒110-0001 東京都台東区谷中2-5-20
電話番号： 03-3823-7501
FAX番号： 03-3823-7516