

- 掲載の製品は平成27年6月の仕様です。製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。
- 印刷条件などにより実際の製品と色が異なって見える場合があります。
- 殺菌灯付P-Sキャビネットは開けると殺菌灯が自動的に消えますが、本カタログでは機能をわかりやすくするため、点灯した状態にいたしております。


P-Sキャビネット取付時の注意事項

- 製品の中には取付け時にご利用いただける原寸図が入っておりますので、よくご確認のうえお取付けください。
- P-Sキャビネットは、背中にフックが付いており、付属の取付け金具を壁に取付けて頂き、取付けられた取付け金具にフックで引っ掛けて設置する商品です。
P-Sキャビネットは器具収納後、30kgほどの重量となりますので、石膏ボードには取付けられません。壁の材質や状態によっては壁側に補強材を入れる事をお勧めいたします。また、コンクリート壁など、非常に固い壁には、カールプラグ等をご利用ください。
- 取付金具の固定は、取付金具3本のボルトで壁にしっかりと固定します。
- 引っ掛ける際には製品の天井部より4cmの余幅が必要となります。また、キャビネットの扉を90°開閉するためには、左右それぞれ5cmほどの余幅が必要となります。
- 電源コードは向かって右側面下部奥に位置しており、コードの長さは2.5mございます。
- 向かって右側面下部にはヘルツ切替えスイッチがあります。故障の原因となりますので、使用地域にあったヘルツに切替えてご使用ください。(関西60hz 関東50hz)


P-S CABINET は 販売実績20万台をこえる技術と ノウハウが息づいています。

キャビネットは先生のおそばにあって末長くご使用いただく身近な診療設備のひとつです。P-Sキャビネットは1台1台が50年余の経験と技術から生まれた製品です。使用金属の材質から、ネジの1本1本まで吟味されていますので、5年後、10年後でも、清潔さと初期の使用感をそのまま保ち、いつも明るく快適な診療をお届けします。

- 外装はスチールにメラミン焼付塗装、内装はステンレス、いつまでもひずみがなく清潔に使用できます。
- P-Sキャビネット「New」シリーズの厚さはわずか20cmです。
- 密閉度の高いマグネットゴムでほこりと雑菌をシャットアウトします。
- 殺菌灯はドアの裏面にあり、取り替えが簡単です。

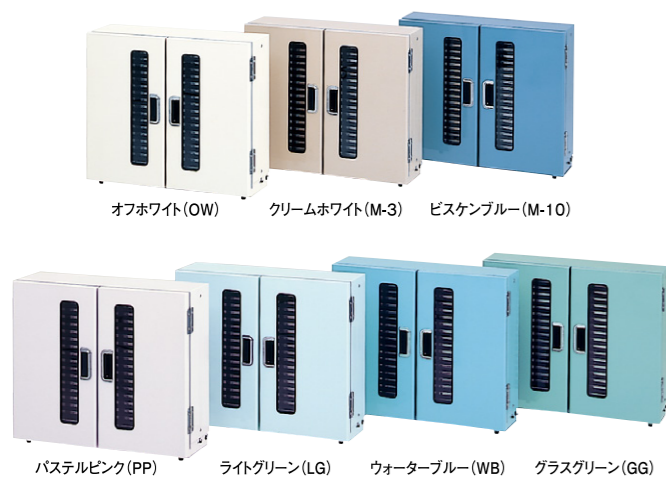

●P-Sキャビネットの標準色オフホワイト (OW) の納期はお問い合わせください。他色は全て受注生産となります。

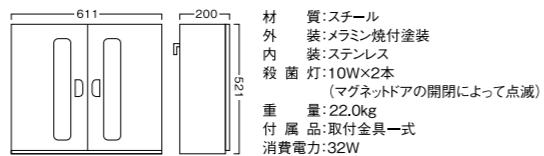

材質:スチール
外装:メラミン焼付塗装
内装:ステンレス
殺菌灯:10W×2本
(マグネットドアの開閉によって点滅)
重量:22.0kg
付属品:取付金具一式
消費電力:32W

P-S New SPECIAL 殺菌灯付


●受注生産



P-S ニュースペシャル・バット用 (P-Sバット1ダース付)
●P-Sバット36枚収納可能



P-S ニュースペシャル・外科用
●フック14本、フックの長さ(80mm)
●一番下のスペースにはエレベーターを約13本置く事も可能

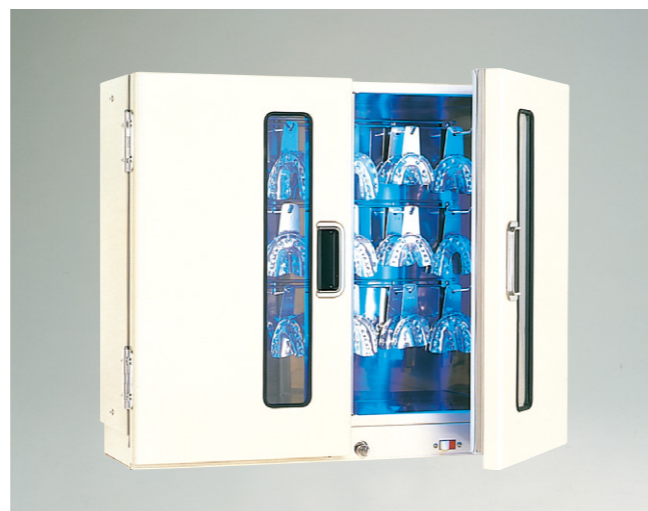

P-S ニュースペシャル・トレー用
●フック18本、フックの長さ(80mm)

P-S NewSPECIALと同サイズですから 自由に選んでコーディネートできます。



P-S コンビ (P-Sバット1ダース付)


P-S COMBI 殺菌灯付

ニュースペシャルシリーズ・コンビ

●受注生産

PSバットを収納出来るバット用キャビネットと外科用器具を収納する外科用キャビネットの2機種の機能を1台に組み合わせたコンビネーションキャビネットをご用意いたしました。PSニュースペシャルの各種と同じサイズとなっておりますので、自由に組み合わせてレイアウトできます。

- PSバット18枚、外科用フック6本収納可能
- 外科用フックの下スペースにはエレベーターを5本置く事が可能。

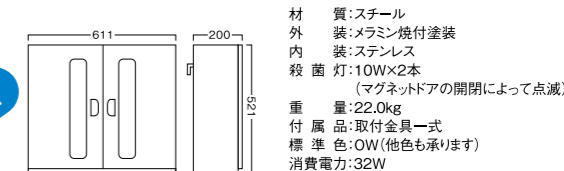

材質:スチール
外装:メラミン焼付塗装
内装:ステンレス
殺菌灯:10W×2本
(マグネットドアの開閉によって点滅)
重量:22.0kg
付属品:取付金具一式
標準色:OW(他色も承ります)
消費電力:32W



P-S コンビ (P-Sバット1ダース付)


P-S COMBI 殺菌灯付

ニュースペシャルシリーズ・コンビ

●受注生産

PSバットを収納出来るバット用キャビネットと印象用トレーを収納するトレー用キャビネットの2機種の機能を1台に組み合わせたコンビネーションキャビネットをご用意いたしました。PSニュースペシャルの各種と同じサイズとなっておりますので、自由に組み合わせてレイアウトできます。

- PSバット18枚、印象トレー用フック10本収納可能

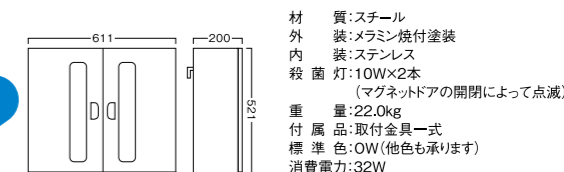

材質:スチール
外装:メラミン焼付塗装
内装:ステンレス
殺菌灯:10W×2本
(マグネットドアの開閉によって点滅)
重量:22.0kg
付属品:取付金具一式
標準色:OW(他色も承ります)
消費電力:32W



P-S コンビ


P-S COMBI 殺菌灯付

ニュースペシャルシリーズ・コンビ

●受注生産

外科用器具を収納する外科用キャビネットと印象用トレーを収納するトレー用キャビネットの2機種の機能を1台に組み合わせたコンビネーションキャビネットをご用意いたしました。PSニュースペシャルの各種と同じサイズとなっておりますので、自由に組み合わせてレイアウトできます。

- 外科用フック6本、印象トレー用フック10本収納可能
- 外科用フックの下スペースにはエレベーターを5本置く事が可能。

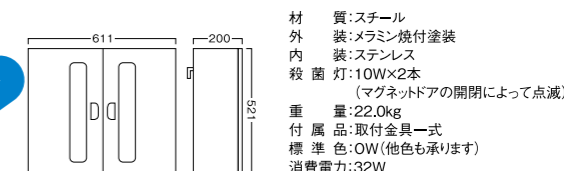

材質:スチール
外装:メラミン焼付塗装
内装:ステンレス
殺菌灯:10W×2本
(マグネットドアの開閉によって点滅)
重量:22.0kg
付属品:取付金具一式
標準色:OW(他色も承ります)
消費電力:32W


必要に応じて自由にチョイスできる
フレキシビリティ。



PS New DELUXE 殺菌灯付

ニューデラックス

- 受注生産
- P-Sバット24枚収納可能

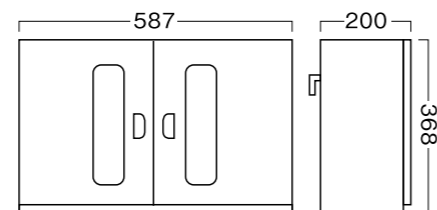

材 質:スチール
外 装:メラミン焼付塗装
内 装:ステンレス
殺 菌 灯:6W×2本(マグネットドアの開閉によって点滅)
重 量:15.5kg
付 属 品:P-Sバット1ダース/取付金具一式
標 準 色:OW(他色も承ります)
消費電力:19W

無駄のない省スペースタイプ
コンパクトなキャビネットです。




PS COMPO 殺菌灯付

ニュースペシャルシリーズ・コンボ

- 受注生産
- P-Sバット18枚収納可能

PSキャビネット ニュースペシャルシリーズに片開きのサブキャビネット登場です。縦サイズはニュースペシャルと同じで間口は半分。従来のニュースペシャルと並べて使用しても違和感がありません。もう少し収納スペースが欲しい時、また小スペースでの開業などにお薦めです。基本はバット用ですが、外科用、トレー用もご用意いたします。自由な組み合わせで限られたスペースを活用してください。

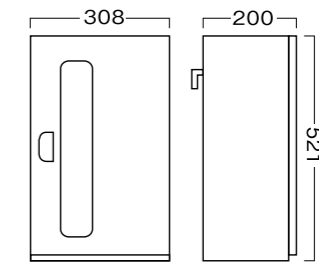


材 質:スチール
外 装:メラミン焼付塗装
内 装:ステンレス
殺 菌 灯:10W×1本(マグネットドアの開閉によって点滅)
重 量:12.0kg
付 属 品:P-Sバット1ダース/取付金具一式
標準機種:バット用
標 準 色:OW(他色も承ります)
消費電力:16W



PS mini DELUXE 殺菌灯付

ミニデラックス

- 受注生産
- P-Sバット12枚収納可能

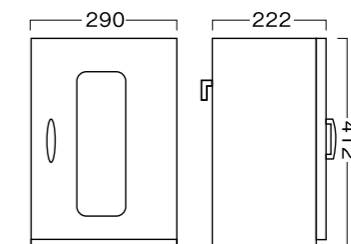

材 質:スチール
外 装:メラミン焼付塗装
内 装:ステンレス
殺 菌 灯:6W×1本(マグネットドアの開閉によって点滅)
重 量:6.0kg
付 属 品:P-Sバット半ダース/卓上用セッティングシュー/壁掛用取付金具一式
標 準 色:OW(他色も承ります)
消費電力:9W


チェアサイドに置いて 患者さんに清潔感をアピールします。



P-S CUBIC 殺菌灯付 キュービック

●受注生産

新感覚のデザイン、使いやすさで好評をいただいております。トレー部は引き出し式ですから、収納や取り出しが容易です。ドアは前方開閉式のためスペースを取らず、ブロンズガラスが明るくシャープなイメージを演出します。


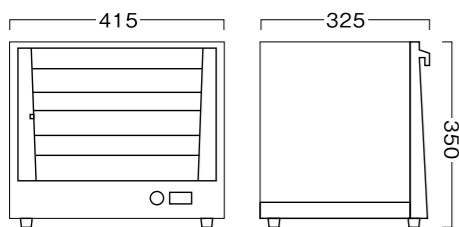


材 質: ステンレス、前面ブロンズガラス
外 装: ステンレスヘアライン仕上一部メラミン焼付塗装
内 装: ステンレス
殺 菌 灯: 10W×1本
(マグネットドアの開閉によって点滅)
重 量: 12.0kg
塗装部標準色: OW(オフホワイト)
消費電力: 16W

P-S VAT P-Sキャビネット専用バット

12枚入1箱

●ゆったりサイズの丈夫で使いやすいステンレス製バットです。

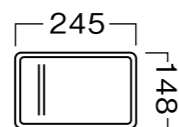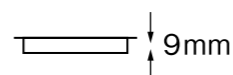

材 料: ステンレス
重 量: 165g

●別売り可能パーツ

商 品 名	仕 様 内 容
P-S用	バット 1ダース
P-S用	殺菌灯 GL-6W
P-S用	殺菌灯 GL-10W
P-S用	殺菌灯 GL-15W
P-S用	殺菌灯 GL-20WSS (長さ53cm通常より短い規格)
P-S用	グローランプ球用 ソケット
P-S用	6W殺菌灯用 安定器
P-S用	10W殺菌灯用 安定器
P-S用	15W殺菌灯用 安定器
P-S用	ドアトッテ 各種
P-S用	ドアパッキン 各種
P-S用	取付金具 各種
P-S用	マイクロスイッチ [殺菌灯 自動点灯用]
P-S用	メインスイッチ [ON・OFF用]
P-S キュービック用	前面ガラス
P-S キュービック用	蝶番金具 (右用または左用またはがごさいます)
P-S キュービック用	棚ローラー (アンサンブルと共用)
P-S キュービック用	蝶番内 板バネ (右用または左用がごさいます)
P-S キュービック用	マイクロスイッチ押さえバネ (向かって右に1箇所)
P-S・シャーカステン共用	AC電源コード (コード長さ2.5m)
P-S・シャーカステン共用	切り替えスイッチ [ヘルツ切り替え用]

●殺菌灯一覧

商 品 名	殺菌灯形名	ランプ電力
ニュースペシャルシリーズ	GL-10	10 W
ニューデラックスシリーズ	GL-6	6 W
PSキュービック	GL-10	10 W
スーパーデラックス	GL-15	15 W
ミニデラックス	GL-6	6 W

●点灯管一覧

商 品 名	適 合 灯
グロー球 FG-7E	4W ~ 10W
グロー球 FG-1E	15W ~ 20W

●その他、上記以外についてはお問合せください。