

エルゴ ソレックス オペレーター

取り扱い説明書



目次

・ 開梱、同梱パーツ	(P.2-P.3)
・ チェアの特徴	(P.4)
・ パーツ名称	(P.5)
・ 組み立て方法	(P.6-P.7)
・ 各部の調節方法	(P.8-P.9)

開梱

このチェアは部分的に組み立てられた状態で、取り扱い説明書と共に届けられます。

梱包を開くときには、下記の部品が入っているかどうかを確認して下さい。

- | | |
|---------------|-----|
| ① アームレスト | 2 個 |
| ② バックサポート | 1 個 |
| ③ 座面部 | 1 個 |
| ④ 支柱、アーム部 | 1 個 |
| ⑤ キャスター部 | 1 個 |
| ⑥ 取り扱い説明書、保証書 | |

同梱パーツ

①アームレスト



②バックサポート



③座面部



④支柱、アーム部



⑤キャスター部



チェアの特徴

1. 360° 回転するアームレストによりマイクロスコープ使用による疲れを軽減することが出来ます。
2. 座面の角度、背もたれの角度は固定にしてもフリーにしてもお使いいただけます。
3. アームレストと腰のサポート部により正しく楽な姿勢を維持でき、長時間のマイクロスコープ使用における疲労を軽減することが出来ます。

パーツ名称



高さ調整レバー

バックサポート
角度調整レバー

アームレスト固定ノブ

サドルシート角度調整レバー

バックサポート
固定ノブ



組み立て方法

・組み立て

支柱の太い側をキャスター部に差し込みます。
しっかり差し込んでアーム部固定ノブ
で固定します。

アーム部固定ノブ



・アームレストの取り付け

アームレストを差し込みます。
アームレストのくぼみの部分がナットの部分
にはまるように位置を合わせます。

⚠ ノブをナットから完全に
抜かないでください。
ナットが抜け落ち、
穴の底に落ちてしまいます。



・座席部の取り付け

支柱にサドルシートを取り付けます。
上から押すことで、
シートと支柱がロックされます。



バックサポートを取り付けます。



各部の調節方法

ノブの種類と説明

- ・バックサポート固定ノブ (A)


緩めることでバックサポートの高さを調節できます。

- ・サドルシート角度調節レバー (B)

上にあげるとフリーで動かせ、下にさげるとロックされ角度が固定されます。

(A)

(B)

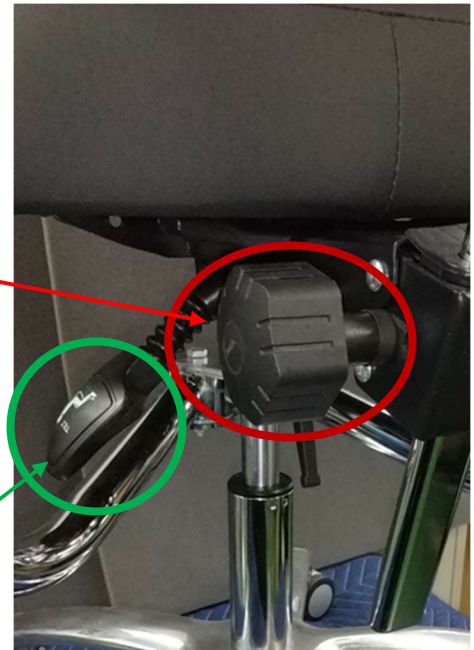

- ・高さ調節レバー (C)

座った状態でレバーを上げると座席をお好みの高さに調節できます。

(C) レバーを下げると固定されます。

- ・バックサポート角度調整レバー (D)

上にあげるとフリーで動かせ、下にさげるとロックされ角度が固定されます。


(D)



- ・アームレスト裏面のレバーを動かすと
ロックが外れ角度を変えられます。

レバーの動きと連動してアームレストの
角度が変わります。

左右どちらにも動かすことができます。

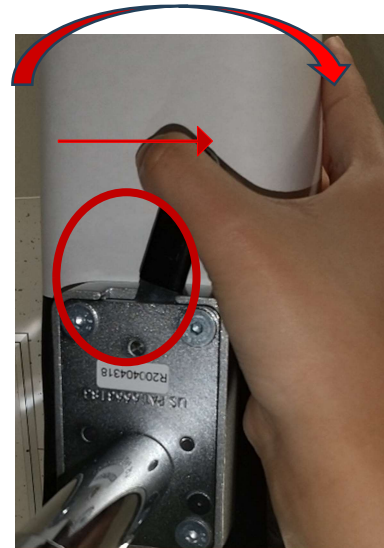

- ・アーム固定ノブを手前に引くと
アーム部を固定したままハンドル部が
フリーに動かせます。



- ⚠ アーム部固定ノブは必ず
下向きになるように
してください。



問い合わせ先



株式
会社

東 京 歯 材 社

電話：03-3874-5077 FAX03-3874-5091